

牙科石膏使用说明书

1. 产品名称： 牙科石膏
2. 型号规格： 超硬石膏/特硬石膏/流动石膏/硬石膏/正畸石膏/玉石石膏/树脂石膏
3. 产品批号： 见外箱
4. 生产日期： 见外箱
5. 原产地： 美 国
6. 生产厂家（分包装厂家）：上海迪繁贸易有限公司
7. 生产地址：上海市万航渡路 505 号 104 室
8. 联系方式：电话：021-62315140
9. 售后服务：上海迪繁贸易有限公司
10. 产品成分：半水磷酸钙及必要的改性剂组成
11. 适用范围：供口腔科用作模型材料或代型材料
12. 禁忌症：无
13. 产品储存条件/方法：产品应在阴凉、避光、干燥处贮存
14. 产品批号：见外箱
15. 有效期限自生产之日起，保质期二年

第一类医疗器械备案凭证：沪静械备 20140001 号

第一类医疗器械生产备案凭证：沪静食药监械生产备 20152393 号

操作说明-水粉比例：

规格型号	水粉比 (每 100 克粉/水量 ml)	每分钟 350- 450 转作机械 搅拌 (秒)	手动搅拌 (秒)	操作时间 (分钟)	固化时间 (分钟)	线固化膨胀 (%)	抗压强度 Mpa
丝奇乐超硬石膏 SILKY-ROCK	23	20-30	60-90	3-6	10	0.09	41
硬石膏 QUICKSTONE	28	20-30	60-90	3-5	10	0.14	27
正畸石膏 ORTHODONTIC STONE	28	20-30	60-90	5-7	10	0.09	31
特硬石膏 PRIMA-ROCK	20	20-30	60-90	6-8	12	0.13	55
流动石膏 FLOWSTONE	22-24	20-30	60-90	6-9	12	0.08	41
树脂石膏 RESINROCK XL5	20	20-30	60-90	5-7	10	0.20	49
玉石石膏 JADE STONE	22	20-30	60-90	5-7	10	0.18	52